



# Strumento LOVLYLOBY con Tecnologia Pull & Click

## LE TECNICHE TRADIZIONALI:

Nei metodi tradizionali, la forza viene applicata dal retro della pistola per forare l'orecchio, spingendo rapidamente l'ago nel lobo. Questo movimento rapido può causare un foro impreciso, provocando dolore e paura nel cliente.

## LA NOSTRA TECNOLOGIA PULL & CLICK:

Il punto chiave della Tecnologia Pull & Click è che consente di avvicinare il dispositivo di foratura al lobo dell'orecchio, mirare con precisione il punto da forare e poi premere facilmente il grilletto. Questa tecnologia fornisce la giusta quantità di forza per forare il lobo senza causare dolore, garantendo al contempo una foratura precisa.



## Utilizzo dello Strumento LOVLYLOBY

- Pulire sia il davanti che il retro delle orecchie, concentrando l'attenzione soprattutto sulla zona dove verrà eseguita la foratura.
- Segnare il punto esatto per la foratura usando l'apposito pennarello in dotazione LOVLYLOBY.
- Per rimuovere la cartuccia, afferrala con due dita dal centro, NON dalle estremità.
- Verifica che il supporto del perno sia completamente inserito all'interno della cartuccia.
- Assicuratevi che l'ago sia correttamente posizionato. *(importante vedere foto)*
- Inserisci la cartuccia nell'apposito alloggiamento dal retro. Premi delicatamente per assicurarti che la cartuccia sia ben posizionata sullo strumento. *(importante vedere foto)*
- Tendi delicatamente l'orecchio verso l'esterno. Mantenere lo strumento parallelo al viso. **Essenziale per la riuscita della foratura è posizionare la parte terminale della cartuccia (dove alloggia la campanella) appoggiata al retro del lobo del cliente.** *(importante vedere foto)*
- Allinearsi al segno sull'orecchio. **Importante tenere il dispositivo ad un'angolazione di 90°.** Premere il dispositivo fino in fondo per **2 secondi** e rilasciare.
- I 2 secondi** sono fondamentali per l'attivazione del **POP-UP System**, meccanismo di sicurezza che espelle la capsula di protezione dell'orecchino, evitando che si incastri e provochi fastidi al cliente.
- Dopo la foratura, rimuovere delicatamente il dispositivo dall'orecchio procedendo verso il basso.

Scansiona qui per  
il video completo  
di foratura

